

## FAQ Често Задавани Въпроси

- Това Китайски пили ли са?

Пилите MG3 GOLD са произведени от Perfect Dental в Shenzhen, Китай. Сплавта във формата на Nitinol Wire е дело на Американска компания – глобален технологичен и пазарен лидер в областта на Nitinol сплавите. Обработката до краен продукт се извършва на немски стругове с ЦПУ. Контрола на качеството се извършва посредством внедрена Система по Качеството в съответствие с изискванията на директива 93/42/ЕЕС Annex V. В резултат получавате висококачествен продукт на разумна цена.

- Какви са предимствата на новата „златна“ сплав?

Предимствата на сплавта се изразяват в повишена гъвкавост и устойчивост на циклична умора спрямо традиционните NiTi пили. Коректно е да се отбележи обаче, че торсионната устойчивост е по – ниска.

- Колко пъти (за колко канала) е безопасно да бъде използвана една пила?

Базирано на информация от производителя и от личен опит считаме, че употребата в 7-8 канала е разумния праг преди пилата да бъде изхвърлена. Преценката на клинициста за конкретния случай и спазването на протокола (последователност, обороти, торк, поддържане на проходимост на канала и гладък път) са от съществено значение за редуциране на риска от сепариране.

- Какъв е размера и тейпъра на каналните инструменти?

Пилите MG3 са с променлив връх и константен тейпър. Размерите са посочени на снимката по – долу:



[www.endo.bg](http://www.endo.bg)

- Трябва ли да се стерилизират преди употреба?

Инструментите MG3 GOLD са стерилно опаковани в блистер и готови за употреба.

- В какви комплекти и дължини се предлагат?

MG3 се предлагат в стерилни блистерни опаковки от 6 инструмента с дължина 25мм. Опаковките засега са само асорт (Starter, P1, P2, G1, G2, G3).

- Защо да избира системата MG3 GOLD?

Системата MG3 Gold предлагана от ЕНДО ООД е разумен и модерен вариант за механична обработка на кореновите канали, позволяваща икономия на финансови средства без компромис в изпълнението. Тя е особено подходяща за обработка на тесни и / или криви коренови канали.