

## FAQ Често Задавани Въпроси

- Това Китайски пили ли са?

Пилите TG – 6 са произведени от Perfect Dental в Shenzhen, Китай. Сплавта във формата на Nitinol Wire е дело на Американска компания – глобален технологичен и пазарен лидер в областта на Nitinol сплавите. Обработката до краен продукт се извършва на немски стругове с ЦПУ. Контрола на качеството се извършва посредством внедрена Система по Качеството в съответствие с изискванията на директива 93/42/ЕЕС Annex V. В резултат получавате висококачествен продукт на разумна цена.

- Какви са предимствата на новата „златна“ сплав?


Предимствата на сплавта се изразяват в повишена гъвкавост и устойчивост на циклична умора спрямо традиционните NiTi пили. Коректно е да се отбележи обаче, че торсионната устойчивост е по – ниска.

- Колко пъти (за колко канала) е безопасно да бъде използвана една пила?

Базирано на информация от производителя и от личен опит считаме, че употребата в 7-8 канала е разумния праг преди пилата да бъде изхвърлена. Преценката на клинициста за конкретния случай и спазването на протокола (последователност, обороти, торк, поддържане на проходимост на канала и гладък път) са от съществено значение за редуциране на риска от сепариране.

- Какъв е размера и тейпъра на каналните инструменти?

Пилите TG – 6 са с променлив връх и тейпър, подобно на ПроТейпър Юнивърсал. Размера на апикалните 3мм са както на снимката по – долу:

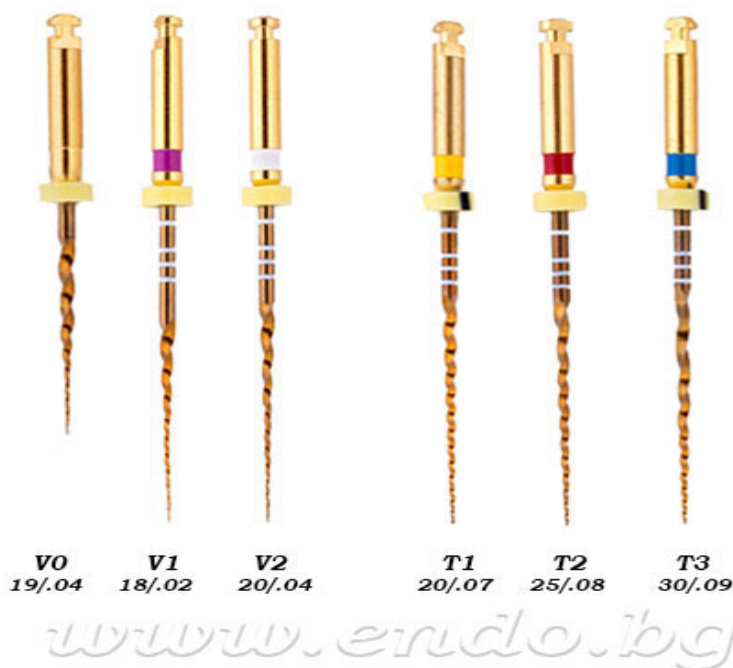

Размерите за подсушаване и obturiranje с [Хартиени](#) и [Гутаперкови щифтове](#) съответстват на F1, F2, F3 предлагани също от ЕНДО ООД.

- Трябва ли да се стерилизират преди употреба?

Инструментите TG – 6 са стерилно опаковани в блистер и готови за употреба.

- В какви комплекти и дължини се предлагат?

TG-6 се предлагат в стерилни блистерни опаковки от 6 инструмента с дължина 21мм, 25мм или 31мм. Опаковките могат да бъдат асортни (V0- T3) или от вид ( V0, V1, V2, T1, T2, T3) на една и съща цена.

- Разбрах за ръчен вариант, какви са особеностите?

Ръчните пили имат същите размери както машинните и силиконова дръжка със стопер. Те са добра алтернатива на машинните инструменти, предназначени за зъболекари, които не разполагат с ендодонтски микроmotor.

- Защо да избира системата TopMost Gold?

Системата TG – 6 предлагана от ЕНДО ООД е разумна алтернатива на оригинала, позволяваща икономия на финансови средства без компромис в изпълнението.